

Wichtige Hinweise zur Reinigung des Polsterbezuges:

Der Polsterbezug Ihres Produktes ist elektrisch leitfähig ausgeführt.

Reinigung: Das Material ist pflegeleicht und kann leicht gereinigt werden.

Regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge überwischen und abziehen.

Flecken gleich entfernen, nicht einziehen lassen.

Nach dem Reinigen mit warmem Wasser nachwischen.

Keine fett- oder ölhaltigen Lederpflegemittel einsetzen, ebenso wenig lösungsmittelhaltige Reiniger oder grobe, scheuernde Bürsten.

Desinfektion:

Je nach Einsatzbereich Ihres Produktes ist eine Desinfektion des Polsterbezuges notwendig!

Verwenden Sie hier keine lösungsmittelhaltigen Erzeugnisse.

Unverhältnismäßiger Einsatz von Desinfektionsmitteln beeinflusst die Lebensdauer des Polsterbezugsmaterials.

Nachfolgende Desinfektionsmittel sind auf Verträglichkeit getestet und können in der angegebenen Dosierung eingesetzt werden:

Bezeichnung	max. Konzentration	Hersteller
Cleansept/Wipes	5%	Dr. Schumacher GmbH
Optisept	7%	Dr. Schumacher GmbH
Hexaquart lemon fresh	2%	B.Braun Melsungen
Meliseptol foam pure	unverdünnt	B.Braun Melsungen
FD 366 / FD 360	unverdünnt	Dürr Dental AG
Aldasan 2000	4%	Lysoform
Franco-Cid N	0,25%	Franken Chemie GmbH & Co.KG
ASCEA-des	unverdünnt	Aquagenius Schweiz GmbH
Dessan 2	0,25%	Franken-Chemie
FD 300	1%	Dürr Dental AG
Antifect plus	0,5%	Schülke & Mayr
Lysoformin spezial	0,75%	Lysoform
Desomed rapid AF	unverdünnt	Desomed
Apesin rapid	3%	Tana Apesin

Achtung: Unbedingt auf sachgerechte Handhabung achten.

Nichtbeachtung kann innerhalb kurzer Zeit zur Versprödung, Verfärbung und Rissbildung des Polsterbezugs führen! In diesem Fall ist eine Gewährleistung ausgeschlossen.

Vor der Benutzung anderer Desinfektionsmittel bitte den Hersteller dieser Mittel nach der Eignung seines Produktes befragen. Er kann die chemische Zusammensetzung und Wirkung am besten beurteilen. Für Tests liefern wir Ihnen gerne kostenlose Musterstücke des Polsterbezugs.

K. H. DEWERT GmbH * Vollmestr. 7 * 33649 Bielefeld – Germany
Tel. 0521/40027-0 * Fax 0521/40027-27 * info@khdewert.de